



WIPE'BAC

STERIMED 100

Fiche produit et d'informations techniques

**LINGETTES NETTOYANTES
DÉSINFECTANTES POUR SURFACE**
en fibres 100% biodégradables



Fiche technique

Dispositif médical Classe IIa

Caractéristiques : STERIMED 100

Pack de 100 lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et les dispositifs médicaux non-immersibles.
Lingettes épaisses et douces **en fibres 100% biodégradables**.

Indications :

Pour le nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non-immersibles (capteurs de pression, connectiques et câbles, testeur de glycémie, sondes échographiques, ...) et l'essuyage préliminaire des gaines d'endoscopes avant immersion pour désinfection. Peut être utilisé pour l'entretien des incubateurs hors présence de l'enfant (protocole fourni sur demande).

Conditionnement :

Format de lingette : 180 x 200mm.

Pack de 100 lingettes épaisses en fibres 100% biodégradables.

Carton de 12 packs.

Actifs :

Ethanol (< 4%), Isopropanol (< 1%), Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7.

Propriétés microbiologiques :

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn.
- Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
- Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* en 1mn, Rotavirus* en 15 mn.

Mode d'emploi :

Soulever le dévidoir et retirer la petite étiquette placée sur l'orifice. Tirer ensuite sur la première lingette. Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation. Produit prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu. A utiliser dans les 3 mois après ouverture.

Précautions d'emploi :

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable. Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

Mode d'emploi :

Agiter avant emploi. Incorporer **ACCEL'PRISE** mélangé à l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage de l'effet recherché.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 - www.rlv-france.com - Email : contact@rlv-france.com